

Slowenisch

ALLES SPÜLT

NAVODILO ZA IZVEDBO PCR-TESTA V ŠOLI

www.bmbwf.gv.at/allerspult

POMEMBNO

30 MINUT PRED TESTOM SI NE UMIVAJ ZOB,
NE ŽVEČI ŽVEČILNEGA GUMIJA, NE PIJ,
NE JEJ IN NE KADI.



SICHERE SCHULE
www.sichereschule.at

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

POTRJEN COVID-19

ŠOLA BO OBVESTILA UČENKO/UČENCA,
STARŠE/VZGOJNE UPRAVIČENCE IN
LABORATORIJ.

COVID-19 NI BIL POTRJEN

ČESTITAMO – OSTANI ZDRAV/-A IN
ŠE NAPREJ OBISKUJ ŠOLO!


EPRUVETA
Z RAZTOPINO




QR-KODE



ZAŠČITNA VREČKA

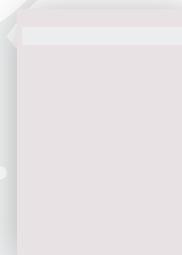

1




- Odlepi QR-kodo s podlage
- Nalepi jo zgoraj na sredini na zelenem zamašk epruvete

Pozor!


- Nalepko je treba nalepiti na čisti in suhi zamašek (ne na epruveto).
- Robove nalepke je treba dodatno pritisniti za boljši prijem.

2




- Odpri epruveto
- Zlij tekočino v usta
- Žvrkljaj tekočino v ustih 30 sekund

3

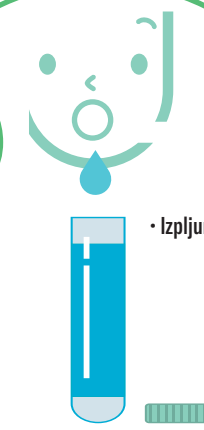

- Izpljuni tekočino nazaj v epruveto

4



- Zapri epruveto z zamaškom

Pozor!


- Zamašek je treba TRDNO zapreti!

5



- Vzorec vloži v zaščitno vrečko in jo dobro zapri

6

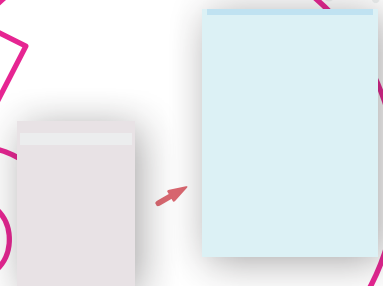

- Vzorec shrani v vrečo